



Chaise Percée Pliante



VR252F

Notice d'Utilisation et d'Entretien

Ce fichier est disponible en format PDF sur notre site www.aidapt.co.uk.
Les clients malvoyants peuvent utiliser un logiciel de lecture de fichier PDF gratuit (comme adobe.com/reader), pour zoomer et agrandir la taille des caractères pour une meilleure lisibilité.

-NB- Cet équipement doit être installé par une personne compétente.

N.B. Les accoudoirs sont uniquement pour le confort

1. FONCTIONNEMENT

La chaise percée comprend un cadre en acier et supporte un poids maximum d'utilisateur de 130 kg (20 stone). Elle est munie d'un système de pliage facile (voir Fig. 1 & 2) et des loquets de verrouillage. Le sceau de 7 litres qui se glisse sur le siège à l'aide des deux glissières est livré avec couvercle pour utilisation lors du transport pour le vidage. Le contenu doit être éliminé correctement, par exemple, dans un WC ou une décharge d'effluents appropriée. Pour plier la chaise percée, retirez le sceau, dégagez les loquets, et tirez l'avant du siège vers l'arrière.

N.B. La chaise percée doit être posée sur une surface plane, et le poids de l'utilisateur réparti uniformément sur la chaise.



fig. 1



fig. 2

2. NETTOYAGE

Nettoyez Chaise Percée Pliante

avec un détergent doux non-abrasif et un chiffon doux. Les produits de nettoyage type AJAX et/ou les éponges abrasives pourraient sérieusement endommager votre produit. Vous ne devez pas les utiliser pour nettoyer votre produit. Veuillez toujours bien sécher votre appareil après le nettoyage.

DIMENSIONS



**Aidapt Bathrooms Ltd, Lancots Lane, Sutton Oak, St Helens, WA9
3EX Telephone: +44 (0) 1744 745 020 | Fax: +44 (0) 1744 745 001 |
Web: www.aidapt.co.uk Email: accounts@aidapt.co.uk |
adaptations@aidapt.co.uk | sales@aidapt.co.uk**